

# Den **bedste** intensive pleje til dine patienter

INTENSIV PLEJE

TLC-4M og TLC-5M

Dine små peri-operative patienter kan være særligt modtagelige for hypotermi, chok, og post-operative komplikationer.

TLC-4M og TLC-5M sørger for den ideelle veterinære intensive pleje i det bedste miljø, og giver dyret den bedst mulige chance for en hurtig rehabilitering.

TLC-4M og TLC-5M er robust, pålidelig og brugervenlig. De er hurtige at starte op i en krise situation. Apparaterne er monteret med pladsbesparende skydedøre og er fremstillet med forsænkninger, der gør det muligt at stable maskinerne.

De to modeller er forskellige i størrelser - TLC-4M har et indvendigt gulv på 370mm (14 1/2") rund og TLC-5M har et gulv på 680mm x 430mm (26 3/4" x 17") hvilket er stort nok til katte og små- til mellemstore hunde. Den anden forskel er at TLC-5M også har monteret en aftagelig stål gitterdør så store og stærke dyr er forsvarligt sikret.

## Primære funktion



Begge TLC modellerne garanterer et sikkert, varmt og hygiejnisk rum. Det avancerede elektroniske styringssystem sikrer en konstant varme, og den aktuelle temperatur aflæses let på det digitale display. Luften cirkulerer forsigtigt rundt ved hjælp af en ventilator, som sikrer en tilstrækkelig frisk luft gennem et fint støvfilter. Varmen leveres af lamelvarmesystem™, som er placeret bag den indvendige væg, og afgiver dermed en konstant jævn varme, uden kolde eller varme felter. Luft cirkulationssystemet sikrer et lille overtryk i kabinen og forhindrer dermed, at inficeret luft udefra trænger ind og smitter dyret.

Et vandreservoir reducerer risikoen for at patienten dehydrerer under behandlingen. For observation af patienten er maskinen forsynet med en gennemsigtig skydedør og et svagt lys placeret bag et glas i maskinens loft.



TLC-5M



TLC-4M

# Brinsea

## TLC-4M og TLC-5M

### SPECIFIKATIONER

#### Udvendige dimensioner:

TLC-4M	475mm høj x 450mm dia. (18 $\frac{3}{4}$ "h x 17 $\frac{3}{4}$ "dia.)
TLC-5M	600mm høj x 760mm bred x 510mm dyb (23 $\frac{3}{4}$ "h x 30"w x 20"d)

#### Indvendige dimensioner: Gulv

TLC-4M	370mm dia. (14 $\frac{1}{2}$ " dia.)
TLC-5M	470mm høj x 680mm bred x 430mm dyb (18 $\frac{1}{2}$ "h x 26 $\frac{3}{4}$ "w x 17"d)

#### Indvendige dimensioner: Minimum højde

TLC-4M	345mm (13 $\frac{1}{2}$ " )
TLC-5M	450mm (17 $\frac{3}{4}$ " )

#### Vægt:

TLC-4M	5.5Kg (12lbs)
TLC-5M	10Kg (22lbs)

#### Materiale:

##### Top og bund

Opskummet, isoleret polyuretan.

##### Sider

Dobbeltvægget ABS med isolerende kerne

##### Klar dør

'Plexiglas' slagfast klar akrylplade (TLC-4M)

Fleksibel PETG klar plastik med udvendigt håndtag (TLC-5M)

##### Gitterdør

M3 krombelagt stål-gitter (Kun TLC-5)

#### Elektrisk tilslutning

230v, 50Hz

#### Strøm forbrug:

TLC-4M	Max 120 Watt Typisk gennemsnit 60 Watt
TLC-5M	Max 200 Watt Typisk gennemsnit 100 watt

### Vigtige ekstra faciliteter

Medicin kan tilsættes i passende mængder som tåge gennem det påmonterede reservoir tilsluttet oxygen. Maskinen har også en separat tilslutning til oxygen



Alarm for temperaturudsving og strømafbrydelse kan tilsluttes som ekstra udstyr i form af Brinsea temperatur alarm modul T20. T20 alarm modul kan tilsluttes Brinsea telefonapparat, så der ringes op til max. 5 telefonnumre for at advare om temperaturudsving i intensiv pleje modulet.

### Praktisk og Funktionel

Travle dyrlæger har brug for effektivt udstyr som er let at rengøre, hurtig at starte op og som kan betjenes med et minimum af træning. TLC modulerne imødegår disse krav igennem et unikt og gennemtænkt design. Dørene skydes let rundt om maskinen for at spare plads. Kontrolmodulet er let at betjene og har letaflyseligt display. Modulet har lav vægt, bærehåndtag, er stabelbar med udfresninger i toppen, som passer til fødderne under bunden, hvilket sikrer stabil stabling.

Maskinerne er monteret med aftagelig plastic bakke i bunden for hurtig rengøring. Resten af interiøret er helt fri for kanter og er derfor let at rengøre.

Som alle øvrige Brinsea produkter er Octagon TLC-4M og TLC-5M produceret under ISO9002 kvalitets normen, og dette er tiltag som medvirker til at sikre en ensartet og pålidelig produktion.

### Garanti

Octagon TLC-4M og TLC-5M leveres med fuld garanti, og enheden vil blive repareret eller ombyttet, hvis en fejl skulle vise sig indenfor garantiperioden (se garantibetingelserne).

Hverken Brinsea Products Ltd, DANKI ApS. eller vore lokale forhandlere kan gøres ansvarlige for følgeskader ved en produktfejl. Brugeren anbefales derfor at tegne en separat forsikring, som dækker eventuelle tab i forbindelse med strømafbrydelser, mekaniske eller elektriske fejl, som overstiger det til enhver tid acceptable niveau.

For at sikre en fortsat udvikling af produktet forbeholder vi os ret til at ændre på specifikationer uden varsel.

# Brinsea

### DANKI ApS.

Orionvej 28, 7430 Ikast, Denmark  
Tlf.: +45 9715 6388 • Fax: +45 96601501  
E-Mail: danki@danki.dk • www.danki.dk